

# Trattamento di ortodonzia

## Descrizione del trattamento

Il trattamento con mascherine invisibili è un trattamento ortodontico che consiste nell'utilizzo di una serie di mascherine di materiale plastico, dispositivi rimovibili che muovono i tuoi denti con piccoli spostamenti progressivi. Tale trattamento combina la diagnosi fatta dal dottore e la prescrizione fatta col software tramite una visualizzazione sofisticata per sviluppare un piano di trattamento che specifichi i movimenti desiderati dei tuoi denti durante il corso della terapia ortodontica. Sotto approvazione del piano di cura stabilita dal dottore, sono prodotte una serie personalizzata di mascherine per il tuo trattamento.

## Procedure

Impress consegnerà la serie di mascherine customizzate a te o alla clinica da te scelta. Il numero totale di mascherine dipenderà dalla complessità del tuo caso, basata sulle indicazioni del dottore nel piano di cura. Gli allineatori saranno numerati singolarmente con istruzioni specifiche per l'utilizzo. Dovrai indossare le mascherine approssimativamente per 20-22 ore al giorno salvo che non ci siano altre istruzioni da parte del dottore. Rimuovile solo per mangiare e lavare i denti. Ogni due settimane potrai passare all'allineatore successivo nella serie o quello indicato dal dottore. La durata del trattamento varia in relazione alla complessità del caso. Alcuni pazienti necessitano di attacchi estetici inseriti sulle superfici dei denti e/o hanno necessità di usare gli elastici e/o fare la procedura di IPR (riduzione interprossimale dello smalto), per facilitare specifici movimenti ortodontici. Alcuni pazienti potrebbero aver bisogno di ulteriori impronte scansioni digitali per mascherine di rifinitura dopo le iniziali serie di allineatori. Affinché i tempi di trattamento sia rapidi, gli spostamenti dentali verranno accuratamente monitorati regolarmente durante il trattamento dei pazienti mediante un'app mobile o tramite la visita in clinica.

## Benefici degli allineatori

- Le mascherine trasparenti offrono un'alternativa estetica ai brackets convenzionali. Gli allineatori sono invisibili e molte persone non si accorgeranno che sei in corso di trattamento ortodontico.
- Il piano di trattamento può essere visualizzato attraverso

un piano 3d e una visualizzazione software che ti consente di visualizzare il risultato finale prima di iniziare il trattamento.

- Gli allineatori sono rimovibili e potrai mangiare e bere confortevolmente così come anche svolgere le attività quotidiane senza alcun problema.
- Sarai in grado di mantenere la tua corretta igiene orale giornaliera (poiché gli allineatori solitamente non provocano l'accumulo di batteri aggiuntivi che potrebbero portare a carie o altri problemi dentali).
- Gli allineatori non hanno fili metallici o gli attacchi associati ai classici apparecchi e consentono un normale spazzolamento e pulizia normalmente ostacolata dagli attacchi ortodontici.
- Indossare gli allineatori migliora le abitudini di igiene orale. Molti pazienti finiscono con un'igiene orale migliorata per una maggiore consapevolezza del loro sorriso e attenzione al migliorarlo.
- Molti pazienti Impress vedono un miglioramento della situazione parodontale (delle gengive) durante il trattamento che migliora la salute orale.
- I dottori di Impress sono capaci di trattare molti casi ortodontici con i nostri allineatori: dai facili ai complessi si arriva a grandi risultati e un sorriso perfetto.
- Raccomandiamo fortemente un monitoraggio digitale durante il trattamento per evitare visite in sede non utili.
- Sarai in grado di comunicare col tuo dottore e con i membri del team di assistenza pazienti attraverso la nostra applicazione mobile e via chat 7 giorni su 7.
- Attraverso il tuo trattamento, potrai scegliere la clinica Impress a te più vicina. Ci adattiamo al tuo stile di vita. Ti permettiamo di cambiare clinica o città liberamente a seconda delle tue esperienze.

## Il trattamento

Il trattamento con mascherine invisibili è un trattamento ortodontico e non è solo estetico. Deve essere sempre supervisionato da un dottore di Impress. Il successo richiede collaborazione, comunicazione e impegno durante il trattamento. Per raggiungere risultati nel più breve periodo di tempo noi raccomandiamo di:

- Indossare gli allineatori 20/22 ore al giorno, toglierli quando mangi o bevi o quando ti lavi i denti.
- Mantenere un'accurata igiene dentale. Devi lavare e spazzolare bene i denti dopo ogni pasto e continuare a indossare gli allineatori per mantenere la tua bocca sana.
- Prenditi cura dei tuoi allineatori. Lava le mascherine con il sapone neutro con uno spazzolino morbido in acqua tiepida, assicurati non sia calda per non danneggiare gli allineatori.
- Scarica l'applicazione mobile seguendo le semplici linee guida indicate via mail (puoi anche chiamare il nostro team per essere aiutato in qualsiasi momento).
- Fai la scansione digitale delle tue arcate e fotografale e inviale al team di supporto al paziente Impress, così come spiegato, ogni due settimane, attraverso l'app mobile.
- Nel caso in cui tu non possa scaricare l'applicazione e tu abbia già scannerizzato la tua bocca come richiesto da Impress, potrai recarti in clinica ogni due settimane per continuare il trattamento, in accordo coi piani stabiliti.
- Nel caso in cui sia necessario fissare un appuntamento direttamente in clinica, ti faremo inserire immediatamente nell'agenda della clinica di tua scelta. Impress non ti potrà garantire risultati del trattamento se non verrai alle visite stabilite in clinica.
- In base alla tua esperienza, il nostro team ti insegnerà a posizionare correttamente le mascherine per più di due settimane. È necessario che tu segua le istruzioni del dottore e che tu cambi le mascherine solo quando il team medico te lo indicherà, al fine di raggiungere il miglior risultato del trattamento.
- Se ci sono alcuni dubbi, problemi, domande insorte per favore chiamaci o contattaci tramite l'app immediatamente. Problemi come per esempio (ma non solo) dolori o fastidi delle mascherine, infiammazioni, sanguinamento, problemi gengivali, allineatori non perfettamente calzanti. Noi siamo qui per offrirti un supporto efficace e tempestivo durante il trattamento, contattaci subito e il nostro team sarà in grado di trovare soluzioni chiare e rapide per il tuo caso.
- Metti le tue mascherine al sicuro. Mettile nel cofanetto che ti abbiamo consegnato. Poiché sono trasparenti, è facile perderle. (ATTENZIONE: nel caso tu perda un allineatore contatta subito il nostro 'supporto pazienti'. In base al tuo caso il dottore dirà come procedere. Sarà possibile che tu possa procedere con l'allineatore successivo, ma in alcuni casi sarà necessario che tu reinserisca invece quello precedente. Ti verrà indicato dal dottore come procedere. Attenzione: il costo di ciascuna mascherina persa è di 95 euro).
- Vieni alle visite in tempo. Il nostro prezzo include tutti i costi delle visite, ma se prenoti un' appuntamento e non ti presenti

senza preavviso di almeno 24 h, ci sarà un costo aggiuntivo di 50 euro. I nostri dottori prenotano una visita con te per un certo lasso di tempo, ti attendono, per cui ti chiediamo collaborazione col tuo dottore e di avvisarlo in anticipo.

Una volta che noi abbiamo creato il tuo sorriso futuro in modo virtuale, ti chiederemo di approvare il trattamento. Una volta che avrai approvato il trattamento virtuale che abbiamo pianificato per te, verranno prodotte le mascherine. Per questo motivo ti chiediamo di visionare il video del trattamento pianificato attentamente, fare domande a riguardo in questo momento e allinearti col dottore prima di approvare il tutto. Qualsiasi modifica fatta dopo l'approvazione del piano di trattamento porterà a un nuovo set di allineatori necessario per continuare il trattamento, con un'aggiunta di costi.

## Rischi e inconvenienti

Come tutti i trattamenti ortodontici e dentali, l'utilizzo di mascherine invisibili comporta alcuni rischi e inconvenienti, indicati di sotto:

- (1) Gli allineatori potrebbero temporaneamente influenzare la pronuncia. In particolare quando si aggiustano per poterli indossare. In generale, i pazienti si abituano subito ad indossarli ed è infrequente che la pronuncia venga alterata per un lungo periodo di tempo.
- (2) Gli allineatori potrebbero causare un'incremento della salivazione o al contrario una secchezza della bocca e certamente alcuni farmaci potrebbero accentuare questi sintomi.
- (3) Gli allineatori indossati fuori dalla sequenza corretta di trattamento potrebbero ledere il raggiungimento del risultato e portare a complicazioni, tra cui anche il discomfort del paziente. Indossa gli allineatori solo nell'ordine indicato su ciascun allineatore e solo dopo che il dottore ha approvato puoi passare al successivo.
- (4) Il trattamento potrebbe durare di più di quanto indicato dal team medico. Questo può succedere per vari motivi: non indossare gli allineatori per 22 ore al giorno, non mandare le foto subito, non presentarsi agli appuntamenti in clinica, non seguire una corretta igiene o pulizia del dispositivo, caratteristiche soggettive dei tuoi denti, delle radici, dello stato di salute della bocca, come ad esempio in caso di problemi parodontali, decalcificazioni, forma inusuale dei denti, o qualsiasi tipo di problema inaspettato. In tal caso il trattamento verrà temporaneamente interrotto, allungato o interrotto per la tua salute orale e per non creare complicanze indesiderate.
- (5) Ci potrebbe essere un periodo di adattamento in cui ci può essere discomfort causato dagli allineatori. Ci potrebbe anche essere rischi legati alla sensibilità dentale e delle

strutture di supporto, a causa delle forze utilizzate sia sui denti che sulla articolazione.

(6) Indolenzimento dei denti e irritazione della gengiva, delle labbra, delle guance e della lingua, incluse piaghe o irritazione dei tessuti molli, potrebbero esserci. Tali fastidi potrebbero insorgere in fase iniziale del trattamento per scomparire in pochi giorni.

(7) Il trattamento ortodontico supplementare, incluso l'uso di bottoni, elastici ortodontici, dispositivi ausiliari, dispositivi ortodontici (TAD, ortodonzia fissa sezionale), e/o procedure restaurative potrebbero essere richieste nei casi più complessi per aiutare il movimento dentale più difficile da ottenere. Gli attachment in composito potrebbero rendere il trattamento più evidente dal punto di vista estetico; questi possono essere rimossi e riposizionati. Verranno rimossi completamente a fine trattamento.

(8) Nei casi di affollamento, potrebbe essere necessario effettuare l'IPR, anche conosciuto come riduzione dello smalto interprossimale (riduzione dello spessore dello smalto interprossimale) per creare lo spazio necessario per i movimenti dentali.

(9) La perdita dei denti, i problemi parodontali, l'infiammazione gengivale, le decalcificazioni si potrebbero verificare se si mangiano e bevono sostanze contenenti zuccheri senza lavarsi bene i denti prima di riposizionare le mascherine oppure se non si mantiene una corretta igiene durante il trattamento.

(10) Potrebbero verificarsi reazioni allergiche.

(11) L'occlusione potrebbe modificarsi durante il trattamento e questo potrebbe portare discomfort temporaneo al paziente.

(12) Il trattamento di morsi aperti severi, overjet molto aumentati, trattamenti in dentizione mista, mascellari stretti scheletricamente necessiteranno un trattamento con allineatori aggiuntivi.

(13) Condizioni mediche generali e uso di farmaci potrebbe inficiare il trattamento.

(14) Un dente che ha subito precedentemente un trauma o che è stato in gran parte ricostruito, potrebbe peggiorare la sua situazione. In rari casi la prognosi del dente è compromessa, portando alla necessaria aggiunta di cure quali trattamenti endodontici, ricostruttivi o anche perdita dell'elemento dentario.

(15) Qualora ci siano già delle protesi (ad es corone) potrebbero essere scalzate, potrebbero necessitare la ricementazione o il riposizionamento.

(16) In caso di affollamento severo o più denti mancanti, è

più facile che le mascherine si rompano. Se succede questo, contatta per favore il tuo ortodontista Impress e la tua figura di assistenza al paziente quanto prima per programmare il riposizionamento.

(17) Alcune eruzioni dentarie (per esempio i denti del giudizio), oppure la crescita dei mascellari o dell'osso soggetto alle forze ortodontiche, potrebbero portare il dottore a cambiare il piano di trattamento, talora necessitando estrazioni dentali di denti permanenti per recuperare lo spazio necessario, e di conseguenza, anche allungando la lunghezza del trattamento. L'eruzione dei denti può portare cambiamenti nell'ottenimento del risultato stabilito, potrebbero anche cambiare l'allineamento dei denti, i tempi eruttivi sono difficili da predire da parte dell'ortodontista. In alcuni casi è necessario rimuovere i denti da latte. Il trattamento potrebbe essere più lungo di quello stabilito a causa dei tempi di sviluppo dell'osso e dell'eruzione e cambio dei denti.

(18) Alcuni pazienti sono più sensibili al riassorbimento delle radici di denti sottoposti a forze ortodontiche. Questo fenomeno è raro e non è predicibile. Solitamente questo non ha notevoli conseguenze, ma occasionalmente può intaccare la longevità del dente e può alterare il piano di trattamento fino a che in alcuni casi isolati, il riassorbimento può portare alla perdita completa dell'elemento dentario.

La polpa del dente con i suoi vasi sanguigni e nervosi sono a rischio, se il dente ha già subito un trauma per un incidente o una carie profonda. E' possibile che in accordo col trattamento ortodontico, questa situazione peggiori e sia necessario il trattamento endodontico.

(19) I problemi parodontali, che si possono sviluppare o peggiorare durante il trattamento dentale, possono essere causati dal trattamento, così come la retrazione gengivale non predicibile, che porta a mobilità dentale. Le gengive possono anche apparire ipertrofiche a causa dell'accumulo di placca. Se i problemi parodontali, gengivali e dell'osso non riescono ad essere controllati, il trattamento ortodontico sarà discontinuo fin quando non sarà raggiunta una stabilità parodontale.

(20) E' possibile ci sia dolore o discomfort dell'articolazione a causa del cambiamento dell'occlusione dovuto all'allineamento dentale. I problemi articolari possono portare mal di testa, dolore all'atm e problemi auricolari. Problemi articolari possono insorgere con o senza il trattamento ortodontico. Al primo sintomo, è necessario avvisare il dottore.

(21) Il dente incluso, anchilosato o ritenuto e/o non erotto hanno bisogno di un trattamento più complesso e la riuscita del caso non è assicurata. I denti potrebbero essere ritenuti nell'osso o nella gengiva, ristagnare (fondersi con l'osso) o star per erompere. Talora, queste situazioni si verificano senza apparente motivo, e solitamente ciò non può essere

previsto. C'è anche la possibilità che i denti inclusi danneggino le radici dei denti vicini, talora anche causando la loro perdita. Talora il trattamento fallisce, portando alla anchilosi del dente, che è impossibile da predire prima dell'inizio del trattamento e che porterà all'estrazione del dente. Il dottore vi avviserà di dover estrarre il dente prima di iniziare il trattamento e rimpiazzarlo con un impianto se sarà necessario.

(22) Alla fine del trattamento ortodontico, l'occlusione potrebbe necessitare una correzione (correzione dell'occlusione)

(23) Se indossi gli allineatori e protesi dentali, (come per esempio corone o ponti), è possibile che questi possano essere compromessi o indeboliti e necessitano di aggiustamenti o riposizionamenti. Prima di iniziare un nuovo trattamento protesico avvisa il tuo dottore per vedere se puoi usare le mascherine e se il trattamento protesico può alterare il modo in cui correttamente posizioni gli allineatori.

(24) I denti che non sono almeno parzialmente coperti dagli allineatori potrebbero estrudere (erompere più della norma)

(25) Nei casi estremi, il riassorbimento radicolare può portare alla perdita del dente.

(26) In rari casi, in pazienti con angioedema ereditario (HAE), un disordine genetico, potrebbe verificarsi un rapido rigonfiamento localizzato nei tessuti sottocutanei, compresa la laringe. HAE può essere innescata da alcuni stimoli, tra cui le procedure dentali.

(27) I dispositivi ortodontici, o parte di essi potrebbero essere ingeriti.

(28) L'osso e le gengive che supportano i denti possono essere lesi durante il trattamento ortodontico. In alcuni casi, lo stato di salute di tali tessuti di supporto possono anche peggiorare.

(29) In alcuni casi, un "triangolo nero" collegato con la mancanza di gengiva può vedersi nel contatto interprossimale, quando vi è stato un sovraccarico per un periodo lungo di tempo.

## Il nostro compromesso

Il movimento dentale dipende dallo stato di salute della bocca, dalla cura, dell'igiene e dalle allergie. Ogni persona è unica. Noi non possiamo garantire il successo del trattamento. In alcuni casi, il cliente richiede la rifinitura del caso con allineatori aggiuntivi, altre tecniche convenzionali e/o procedure estetiche, come per esempio corone, o intarsi per raggiungere il risultato finale.

In tutti i casi noi faremo del nostro meglio per raggiungere il miglior risultato possibile con il trattamento a te suggerito:

- In alcuni casi abbiamo bisogno di scannerizzare le arcate

e ordinare ulteriori allineatori per raggiungere il risultato pianificato (rifinitura). Tutti gli allineatori aggiuntivi saranno gratuiti. Quando ordiniamo allineatori aggiuntivi, dovrai aspettarli perché sono individualizzati. Mentre aspetti, dovrai indossare l'ultima coppia di allineatori finché non riceverai i nuovi.

- Potremmo utilizzare un IPR aggiuntivo a quello pianificato nel trattamento ortodontico.

- Nel caso in cui non riusciamo a ottenere il risultato pianificato dopo altri allineatori aggiuntivi e altre tecniche ortodontiche, Impress rimborserà la somma versata senza i costi aggiunti (come per esempio le visite mediche, le scansioni, il monitoraggio del paziente). Impress ti darà tutte le mascherine necessarie prima di iniziare il trattamento. Tuttavia, in alcuni casi potrai ricevere il set di mascherine in due tranches nel momento in cui il caso risulta essere complesso o di durata più lunga. Il trattamento tradizionale prevede 12 steps. Riceverai un numero differente di mascherine se il dottore lo riterrà necessario e in tal caso queste potranno essere consegnate in più fasi.

Un trattamento ortodontico è un trattamento medico e Impress non può garantire e non può provvedere a una rifinitura e una contenzione se il paziente non collabora con il dottore: per ottenere il risultato dovrai indossare le mascherine 20-22 ore al giorno, completare la scansione tramite app ogni 2 settimane come richiesto e fare le visite mediche. In questo caso il paziente deve pagare 50 euro per la rifinitura per ogni mascherina e 95 per la prima mascherina di contenzione. Il trattamento con le mascherine invisibili è un trattamento medico personalizzato. Dopo l'approvazione del piano di cura personalizzato in 3d, Impress inizierà la produzione delle mascherine. Se il paziente dovesse decidere di rinunciare al trattamento dopo aver già effettuato il primo pagamento per la produzione degli allineatori, Impress™ non accetterà nessuna richiesta di rimborso da parte del paziente. Inoltre i pazienti saranno responsabili dei costi inclusi nella produzione degli allineatori, come per esempio ma non solo: le visite mediche, i raggi x e la scansione.

Prima di passare alla produzione degli allineatori la pianificazione 3d del caso deve essere approvata da controllori interni. In rari casi il capo degli ortodontisti potrebbe applicare delle modifiche alla pianificazione 3d. In questo caso ti sarà fatta vedere la nuova simulazione per farti approvare prima di passare alla produzione delle mascherine. In casi rari le mascherine potrebbero non inserirsi correttamente sui denti per difetti di materiale di produzione. In questo caso provvederemo a darti degli allineatori nuovi quanto prima.

## Dopo il trattamento

I denti continueranno a muoversi in modo naturale e potranno cambiare di posizione dopo il trattamento. L'uso costante delle mascherine di contenzione alla fine del trattamento dovrebbe ridurre questa tendenza. Dopo l'ultima fase del trattamento, dovrà venire in clinica per un'ultima scansione, eseguita per produrre il Suo primo apparecchio di contenzione gratuito. Per mantenere i migliori risultati possibili anche a lungo termine, raccomandiamo ai pazienti di venire per un controllo 6 mesi dopo aver completato il trattamento, 12 mesi dopo e 18 mesi dopo. Si consiglia di cambiare gli apparecchi di contenzione ogni 6 mesi in modo da mantenerli puliti e per mantenere costante la pressione esercitata.

Il consenso informato è dato liberamente e può essere revocato in qualsiasi momento come consentito dal diritto autodeterminazione. Per farlo, deve inviarci una comunicazione scritta a [gdpr@smile2impress.com](mailto:gdpr@smile2impress.com).



# Beneficia del tuo sorriso!

## Note

---

---

---

---

Data: A \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ 2021

Dr/Dr.ssa \_\_\_\_\_

N°Registrazione \_\_\_\_\_

Clinica \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Firma

### RICEVUTO E CONFERMATO

Nome e Cognome del paziente

Luca Garofalo \_\_\_\_\_

Carta d'identità N° \_\_\_\_\_

Firma



# Titolare per il trattamento dei dati personali

**Smile2impress, S.L.**

Calle Balmes 174  
Barcellona Spagna

## INFORMAZIONI DI CONTATTO

**Nome & Cognome** Luca Garofalo

**Indirizzo** Via Settembrini 28

**E-mail** Lucagaro1996@gmail.com

**N° Carta d'identità** AY2938201

**Stato/Provincia** San Giuliano Milanese **Codice postale** 20098

**Numero di Telefono** 3479954810

## Responsabile per la protezione dei dati: [gdpr@smile2impress.com](mailto:gdpr@smile2impress.com)

### Obiettivo

Lo scopo principale è quello di raccogliere i dati relativi allo stato di salute del paziente al fine di facilitare l'assistenza sanitaria, registrando tutti i dati che, secondo i criteri medici, permettono la conoscenza accurata e aggiornata dello stato di salute di un paziente. Il Trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) e del D. Lgs. 196/ 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Allo stesso modo, i dati saranno utilizzati anche per scopi amministrativi (compresi i promemoria degli appuntamenti) e la fatturazione dei servizi resi.

### Durata della conservazione

I dati sanitari inclusi nella storia clinica saranno conservati, per un periodo di 5 anni a meno che l'ordinamento giuridico non preveda maggiori tempi di conservazione (ad es. per le cartelle cliniche e i referti, la conservazione è a tempo illimitato, cfr. Circolare del Ministero della Sanità del 19 dicembre 1986 n.900 2/AG454/260; per l'iconografia radiologica, la conservazione è per 10 anni, cfr. D.M 14 febbraio 1997). I dati relativi alla gestione amministrativa e di fatturazione dei servizi saranno conservati per i periodi stabiliti dalla legislazione applicabile (attualmente per 10 anni, ai sensi dell'art. 2200 cod. civ.).

### Terze parti (Trasferimento Dati)

La informiamo inoltre che i dati raccolti, in alcuni casi, devono essere trasferiti a:

- (1) Laboratori di protesi e analisi quando necessario per il trattamento, con l'unico scopo di fornire il servizio sanitario.
- (2) Compagnie di assicurazioni mutue e mediche, se lei è titolare di una polizza di questo tipo, al solo ed esclusivo scopo di gestire il servizio con la compagnia assicurativa.
- (3) Alle istituzioni finanziarie, nel caso in cui lei decida di finanziare il suo trattamento.
- (4) Alle agenzie amministrative, al solo scopo di fatturare i servizi prestatati e di rispettare la legislazione fiscale e commerciale. In alcuni casi, scattiamo fotografie e video denta-

li con i pazienti al fine di mostrarli su siti web, social media, congressi medici a scopo didattico e/o pubblicitario.

Con la presente autorizzo:

Autorizzo l'uso delle mie fotografie e immagini dentali per gli scopi sopra indicati.

Se lei si sottopone a test radiodiagnostici in centri esterni allo scopo di seguire il suo trattamento.

Autorizzo l'uso dei miei test radiodiagnostici a raggi X per gli scopi sopra indicati.

Vorremmo anche metterci in contatto con lei per ricordarle gli appuntamenti e le visite di controllo, per posta, e-mail, SMS, WhatsApp o simili, così come per informarla sulle novità e i nuovi servizi della clinica.

Autorizzo l'invio di comunicazioni per via postale o elettronica di appuntamenti o revisioni con la clinica.

Autorizzo l'invio di comunicazioni per via postale o elettronica per ricevere comunicazioni commerciali dalla clinica.

## Diritti

Può rivendicare i suoi diritti di accesso, rettifica, soppressione, limitazione, cancellazione, opposizione e portabilità contattando la Clinica di persona o inviando una e-mail al seguente indirizzo [gdpr@smile2impress.com](mailto:gdpr@smile2impress.com)  
Allo stesso modo, ha il diritto di

(1) Ritirare il/i consenso/i dato/i

(2) Reclamare i suoi diritti all'autorità di vigilanza (The Information Commissioner's Office UK)

Con questo documento lei adempie all'obbligo legale di informazione richiesto dalle norme sulla protezione dei dati e firmando questo documento dà il suo consenso al trattamento dei suoi dati per le finalità sopra menzionate. Informazioni di secondo livello in:

<https://smile2impress.com/policy/politica-de-privacdad-italian.pdf>

**Nome e cognome del paziente**

Luca Garofalo

---

**Nome e cognome del tutore/i legale/i**

(Nel caso in cui il paziente abbia meno di 14 anni)

---

**Numero Carta d'Identità del paziente**

\_\_\_\_\_

**Numero Carta d'Identità**

**del tutore legale (Se applicabile)**

\_\_\_\_\_

**Data** 11/02/2022

**Firma**

